



東洋医学のお灸が進化!  
鍼灸施術をより安全に手軽に…。

温灸施術を いつでも どこでも 何度でも



治療家の必需品

火を  
使わない

煙を  
出さない

臭い  
がしない



新発売

QL-19

- ワンクリックで瞬時に快適な刺激が可能です。
- 煙が出ず、臭いがしないクリーンな温灸として鍼灸施術に使われています。
- 先端部約7mmφで安定した刺激を圧痛点、反応点へ施術

## 温灸器の決定版

# 一灸 IKKYU


QL-19 ¥119,000 (税別)

### 操作手順

- ① 電源スイッチをONにする
- ② 温度設定スイッチ(オレンジ色)で温度を選ぶ
- ③ 加温スイッチ(黄色)をクリックする


### ■直接刺激 温熱刺激温度

低温 47℃ 1回3秒間  
 中温 51℃ 1回3秒間  
 圧痛点へ少しずらしてクリック

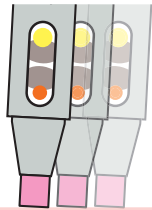

### ■間接刺激 温熱刺激温度

高温 60℃ 1回3秒間  
 専用パッチ+ヨモギエキスの  
 コンビネーション施術専用温度  
 パッチの上から、圧痛点へ少しずらして  
 クリック

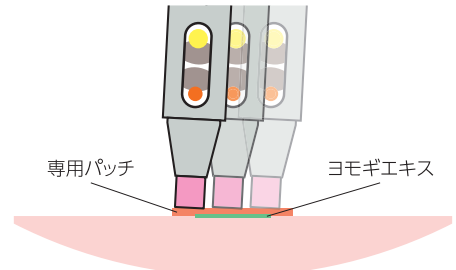


### ■連続使用 も可能

一定の温度を  
 出し続けます。  
 (プロ仕様)

### ■仕様 温灸器 管理医療機器(クラスII)

認証番号	228AGBZX00119000
型式	QL-19
使用環境温度	0℃~40℃
電池	単3乾電池×4個(マンガン乾電池使用不可)
定格	6.0V×10W
温度設定	低温47±2℃ 3秒 長押し4.5秒 中温51±2℃ 3秒 長押し4.5秒 高温60±2℃ 3秒 長押し4.5秒
刺激面積	約φ7mm 38mm <sup>2</sup>
寸法	本体 180×φ26mm 電池ボックス 72×65×20mm ケーブル 1500mm
重量	約230g(電池含む)
近赤外線LED	870nm200mw(最大)
赤色LED	660nm7000mcd(最大)
付属品	・単3形アルカリ乾電池……………4本 ・携帯用ポーチ……………1個 ・保証書、取説 ・ヨモギエキス メディカルパッチ

### 付属品

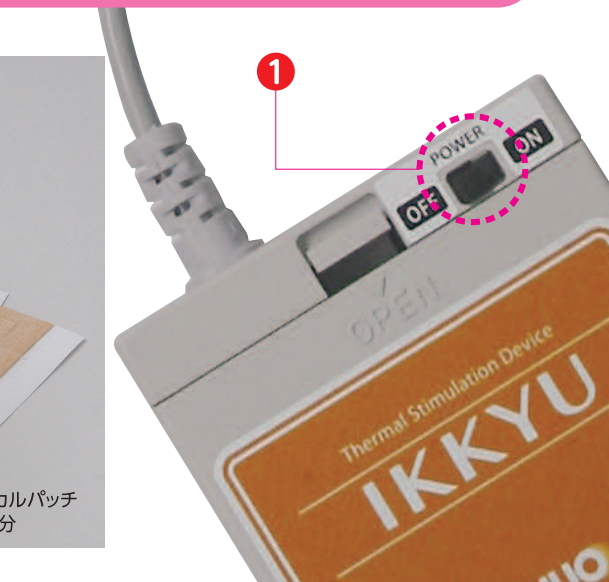

## 手軽で安全なお灸を再現 温熱刺激で毎日をスッキリ!

- 火を使わないので、安心して使用。  
火を使わないので煙も、臭いもないからお部屋など周りを気にすることがありません。
- 3段階の温度調節が可能。  
47℃・51℃・60℃の3段階。お好みに応じて選べます。
- ペンタイプで持ちやすい。  
美容にもオススメです。女性の方でも気軽に使用できます。

製造販売元

科学で健康を考えるメディカルシステム

## 株式会社 チュウオー

〒665-0874 兵庫県宝塚市中筋1-9-32  
 TEL.(0797)88-2121(代) FAX.(0797)88-1313  
 URL <http://www.chuoms.co.jp>  
 E-mail [mail@chuoms.co.jp](mailto:mail@chuoms.co.jp)

販売代理店