

목 차

경고표시	1
고장이라고 생각된다면	3
각부 명칭과 기능 사용방법	4
일상점검 및 관리	6
보증규정	7

●머리말

BANSHIN을 구입해주셔서 감사합니다.

본 기기는 예전부터 이용되어 오던 썩뜸 및 번침 대응으로 사용하며, 동양의학의 경혈을 활용하여 자극합니다.

●부탁 말씀

본 기기는 열자극장치입니다. 잘못 사용하면 저온화상을 일으킬 수 있습니다.

본 취급설명서를 잘 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

⚠ 경고표시

제품을 사용하기 전에 취급설명서 본문에 있는 경고표시 부분을 주의 깊게 읽고 이해해주시시오.

⚠ 금기, 금지	본 장비의 성능을 초과하는 부적절한 사용방법으로 인해 사망 또는 중상을 입을 위험성이 있습니다.
⚠ 경 고	이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있음을 나타내고 있습니다.
⚠ 주 의	이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 장애를 일으키거나 물적손해가 발생할 가능성이 있음을 나타내고 있습니다.

정확하게 사용하기 위하여

⚠ 경고

1. 외관에 이상, 변형이 없는지 확인하고 이상이 있을 때에는 사용하지 마십시오.
2. 피부가 약한 부분에는 사용하지 마십시오. 또한 장시간 같은 부위에 사용하지 마십시오. 피부에 염증을 일으키거나 화상을 입을 우려가 있습니다.
3. 번침(BANSHIN)의 목적 이외에는 사용하지 마십시오.
4. 욕실 등 습기가 많은 장소, 물이 닿기 쉬운 장소에서 사용하면 본체 내부에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다. 그러한 장소에서는 사용하지 마십시오.
5. 신체가 불편한 분, 어린이, 유아에게는 사용하지 마십시오.
6. 수면제 등을 복용한 사람이나 몹시 취한 상태의 사람에게 사용하지 마십시오.
7. 본 기기를 분해하거나 개조하지 마십시오.
8. 본 기기나 전지를 불 속에 넣지 마십시오. 전지가 파열되거나 유해한 물질이 나올 수 있습니다.

⚠ 금기 · 금지

다음 1~9에 해당하는 상태, 또는 진단을 받은 사람은 사용하지 마십시오.

1. 악성종양 환자
2. 심장 장애 환자
3. 온도감각을 상실한 사람
4. 임신 초기의 불안정기 또는 출산 직후에 해당하는 사람
5. 당뇨병 등에 따른 고도의 말초순환장애에 의해 지각장애가 있는 사람
6. 안정이 필요한 사람
7. 체온이 38℃ 이상(유열기)인 사람
8. 척추골절, 염좌, 근육이 갑자기 수축하거나 끊어지는 증상 등, 동통성 질환을 가진 사람
9. 저온화상을 입은 적이 있는 사람

다음과 같은 인체 부위에는 사용을 금지해주시시오.

- 인체 내부 또는 삼입부
- 점막부
- 연약하거나 민감한 피부 부위

정확하게 사용하기 위하여

●사용 환경 및 사용조건

1. 다른 의료기기와 병행할 경우, 반드시 의사의 지도하에 사용해주십시오.
2. 뾰족한 앞부분 단자는 극소형 히터로 되어있으므로 충격 등에 약하며, 떨어지거나 부딪히면 파손됩니다. 핀이나 침으로 자극하거나 칼 같은 것으로 흠집을 내지 마십시오.
3. 본 기기는 세밀한 기기이므로 떨어뜨리거나 부딪히면 고장이 날 우려가 있습니다.
4. 전지는 단락으로 인해 발화되거나 망가질 수 있으므로 취급시 충분한 주의를 기울여주십시오.

●사용 전 주의사항

1. BANSHIN이 정상으로 작동하는지 확인하여 주십시오.
2. 오랫동안 사용하지 않았을 때에는, 다시 한 번 취급설명서를 읽은 후 정상적이고 안전하게 작동하는지를 확인하고 나서 사용하여 주십시오.
3. 전지는 (+),(-) 를 반대로 넣지 마십시오.

●사용 중에는

1. 본 기기는 끝부분이 가열되어 60℃~65℃의 열을 발생하기 때문에, 열감각이 무딘 사람은 충분히 주의를 기울여주십시오.
2. 사용 후 효과가 발생하지 않을 경우, 의사 또는 전문가와 상담해주십시오.
3. 동일부위를 연속하여 반복적으로 자극하지 마십시오.
4. 고장 발생시, 즉시 사용을 중지해주십시오.
5. 사용 중에 신체에 이상을 느끼면 즉시 사용을 중지하고 의사 또는 당사로 연락주십시오.
6. 다음과 같은 병증으로 치료중인 사람은 사용 전에 반드시 주치의와 상담해 주십시오.
고혈압, 부정맥, 수면시 무호흡증, 천식이 있는 분
7. 스위치를 눌러도 LED가 점등되지 않을 경우, 본체 내부 전지의 접촉이 나빠졌을 가능성이 있습니다. 전지를 빼낸 후 상태를 확인해주십시오.

●사용 후 및 관리 장소에 대하여

1. 본 기기를 위생적으로 관리하기 위하여 본체, 부속품 등은 사용 후 및 보관 전에 반드시 청소하여 주십시오.
2. 사용 후 및 보관 시에는 반드시 노즈캡(뚜껑)을 끼워주십시오.
3. 거꾸로 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.
4. 습기가 많은 장소, 물이 있는 장소에 방치하지 말아주십시오.
5. 본 기기는 다음 사용시 지장이 없도록 청소하고, 직사광선이 닿지 않는 장소, 습기가 적은 장소에 관리하여 주십시오.
6. 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
7. 오랫동안 사용하지 않을 때에는 반드시 전지를 빼주십시오, 전지가 누전되어 본체 고장의 원인이 됩니다.
8. 부속품이나 소모품을 폐기할 경우에는 각 지자체의 정해진 방법에 따라 처리해 주십시오.

 **주의**

정확하게 사용하기 위하여

■ 이럴 때에는?

상황	생각할 수 있는 원인	처리방법
발광 LED: 점등되지 않는다.	케이스 캡이 느슨하게 되어있다.	케이스 캡을 조여주십시오.
	전지 접촉 불량	전지를 뺐다가 다시 넣어주십시오. 전지는 (+), (-)를 반대로 넣지 마십시오.
발광 LED: 적색과 녹색이 점등된다	전지가 소모되었다.	전지를 새 것으로 교환해주시십시오.
발광 LED : 적색이 점등된다	전지가 급격히 소모되고 있다.	전지를 새 것으로 교환해주시십시오.
자극(열감)이 느껴지지 않는다.	고장 가능성이 있다.	판매처 또는 당사로 연락주십시오.
떨어뜨렸다.	충격에 의한 고장	점검이 필요합니다. 판매처 또는 당사로 연락주십시오.
물에 닿았다.	고장이나 동작불량을 일으킬 가능성이 있다.	

■ 고장 및 수리서비스

1. 본 기기에 결함 또는 고장이 발생하면 판매처 또는 당사로 연락주십시오. 상태에 대해 들은 후, 고장 의뢰 순서를 상세하게 알려드리겠습니다. 고객 측에서 절대로 분해, 개조 등을 하지 마십시오.
2. 본 기기의 수리를 의뢰할 경우, 꼼꼼히 포장한 후 지정된 장소로 보내주십시오.
3. 고장내용을 진단하여 견적을 내드리며, 그 후 수리에 들어갑니다.
4. 수리 완료 후 고객에게 연락하고 택배로 보내드립니다.

각부의 명칭과 기능 및 사용방법

■ 각부 명칭



■ 세트 구성



그 외 부속품

- 취급설명서
- 첨부문서

■ 사용방법

처음 사용하는 경우에는 반드시 손바닥 등의 편평하면서, 비교적 피부의 두꺼운 부위에서 얇은 부위로 이동하면서 사용해주시기 바랍니다. 사람마다 자극을 느끼는 감각과 피부가 다릅니다.

피부가 약한 부위나 피부가 약한 사람에게 갑자기 사용하면 경도의 화상을 일으킬 우려가 있습니다.

사용방법

기본적 사용방법과 특징

1. 적용 가능한 증상

동작시 일어나는 경직, 경련, 통증 등의 경근병을 대상으로 합니다.
그 이외에도 뜸 대응, Spot온열 자극장치로 응용할 수 있습니다.

2. 자극부의

국소 동통부위, 국소와 관련된 압통 등의 반응점, 동통부위를 통과하는 말초 瘵穴, 兪穴이라는 경혈이 자극부위입니다.

3. 사용방법

①노즈캡(끝부분의 캡)을 분리합니다.

②뾰족한 끝부분을 경혈부위에 접촉시킵니다.

③BANSHIN의 스위치를 누릅니다.

④경혈부위로부터 뾰족한 부분을 떼어냅니다.

*자극하는 동안 발광 LED가 녹색으로 점등되며 전자음(작은 소리)이 울립니다.

*자극시간은 약 1초입니다. 스위치를 누르면 발열이 시작되고 자동적으로 정지합니다.

*발광 LED 녹색이 꺼질 때까지 스위치를 계속 눌러 주십시오.

*사용 중에 적색 LED가 점등된 경우, 신속히 인체로부터 떼어내 주십시오.

⑤사용 후에는 반드시 노즈캡을 씌워주십시오.

※ 뾰족한 끝부분을 보호하고 굴러가지 않도록 방지하기 위함.



발광LED

4. 자극량

원래는 한 군데의 경혈에 1초 이내(온열자극)가 좋지만 조금 더 자극할 경우에는 뾰족한 끝부분을 자극부위에서 조금 떨어진 부위에 대주십시오.

5. 자극감

스위치를 누름과 동시에 약간 따끔한 자극감이 듭니다.


⚠ 주의

- 자극하는 부위의 온도가 낮은 경우, 스위치를 누르고 나서 발광 LED(녹색)이 없어지기까지 시간이 오래 걸립니다.
- 사용하는 환경의 온도가 낮은 경우, (15℃ 이하) 정상적으로 자극할 수 없을 때가 있습니다. 이러한 경우에는 사용 전에 본 기기를 여러 번 동작시켜 주십시오.
- 발광 LED가 적색으로 점등된 경우, 신속히 새 전지로 교환하여 주십시오.
- 전지가 소모되면 자극온도가 불안정하게 되어 경도의 열상을 입는 경우가 있습니다.
- 동일 부위에 연속하여 반복적으로 자극하지 말아주십시오. 경도의 열상을 입는 경우가 있습니다.
- 자극감은 따끔한 정도입니다. 자극을 강하게 느낄 때에는 (너무 아픴), 피부가 약할 수도 있으니 자극을 참지 마십시오. 경도의 열상을 입는 경우가 있습니다.

사용방법

사용 전에 준비해주시시오.

전지를 넣을 때, (+), (-)를 구분하여 넣어주시시오.

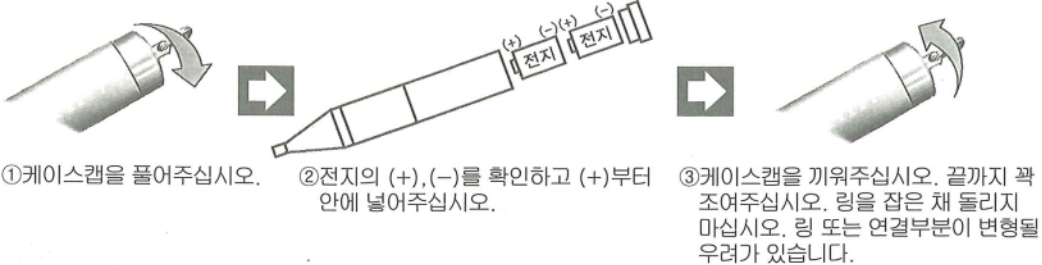

■ 전지교환에 대하여

- 전지가 소모되면 발광LED가 빨강색으로 점등됩니다. 신속히 새 것으로 교환해주시기 바랍니다.
- 전지 교환 시기는 사용빈도, 사용방법에 따라 다릅니다.
- 전지 교환은 반드시 2개를 동시에 새 것으로 바꿔주시시오. 전지의 메이커는 상관없지만, 같은 메이커의 전지를 사용해주세요.
- 빼낸 전지를 보관, 폐기할 때에는 단자부에 테이프 등을 붙여 절연시켜 주십시오.
- 전지를 폐기할 때에는 지자체의 정해진 규율에 맞는 폐기방법에 따라 처리해주세요.
- 장기간 사용하지 않을 경우, 반드시 본체에서 전지를 뺀 후 보관해주세요. 액체 누설 및 고장의 원인이 됩니다.
- 리튬전지(CR2)는 충전할 수 없습니다. 충전하면 발화, 발열, 액체누설, 파열될 우려가 있습니다.

■ 전지구입에 관하여

- 다음과 같은 전지를 구입하여 주십시오.
- 전지는 가전제품 판매점, 카메라 취급점 등에서 판매하고 있습니다.

★ 리튬 전지 : CR2(3V) x 2개

- ※메이커는 상관없습니다.
- ※카메라용으로 표시되어있는 경우도 있습니다.

■ 일상 점검 및 관리

- 사용 전에 외관에 이상, 변형이 없는지 확인해주세요.
- 사용 전에 1회 이상 동작시켜보고 발광LED가 녹색으로 점등되는지, 발광LED가 빨강색으로 점등되어 있지 않은지 확인해주세요.
- 적색 발광LED 점등은 전지소모를 나타냅니다. 새 전지로 빨리 교환해주세요.
- 사용 전에 손바닥 등 비교적 피부가 두꺼운 부분에 뾰족한 끝부분을 대고, 이상이 없는지 (너무 세다면가) 확인해주세요.
- 사용 후, BANSHIN을 처방 받는 분(환자)이 바뀔 경우, 반드시 뾰족한 끝부분을 깨끗이 닦아주세요.
- 뾰족한 끝부분은 알코올 목화솜 등으로 소독해주세요. 이때 너무 힘을 주지 않도록 주의해 주십시오.
- 뾰족한 끝부분은 섬세하게 되어 있으므로 손상이 가지 않도록 주의하여 취급해주세요.
- 사용 후, 기기를 위생적으로 보관하기 위해 본체, 부속품 등은 다음 사용시 지장이 없도록 깨끗이 해주세요.
- 본체가 더러워졌을 경우, 부드럽고 마른 천으로 닦아주세요. 더러움이 심하다면 천을 소독용 알코올에 적셔 살짝 닦아주세요.

⚠ 경고

- 전지는 리튬, 유기용매 등의 가열성 물질을 내장하고 있으므로 잘못 사용하면 전지가 발화, 발열, 누액, 파열되거나 사람이 상처를 입을 수 있으며 기기 고장의 원인이 됩니다. 전지의 주의사항을 잘 확인하고 사용해 주십시오.
- 전지를 충전, 단락, 분해, 낙하, 변형, 가열, 납땀하지 마십시오. 불에 넣지 말아 주십시오.
- 금속제나 장신구, 목걸이 등을 한 상태로 자극하지 마십시오. 전지가 단락될 가능성이 있습니다. 반드시 수납케이스에 보관해 주십시오.

보증규정

- 1) 취급설명서에 따라 정상적인 사용 상태에서 고장난 경우, 무상 수리해드립니다.
- 2) 보증기간은 구입 후 1년입니다.
- 3) 보증기간에 해당하더라도 다음과 같은 경우는 유상수리입니다.
 - 가. 사용상 실수, 부당한 수리 및 개조에 의한 고장 및 손상
 - 나. 화재, 지진, 수해, 낙뢰, 기타 천재지변, 공해, 전원 이상으로 인한 고장 및 손상
 - 다. 구입 후 낙하 등 부주의에 의한 고장
 - 라. 소모부품
 - 마. 본 제품 이외의 요인이 고장의 원인이 되었을 경우
- 4) 본 서를 분실하지 말고 잘 보관해주시기 바랍니다.